

# Proxident Muntork salivstimulerande

## Metodbeskrivning



**Proxident muntork, salivstimulerande med äpple och pepparmint** fuktar torra munslemhinnor och ger en fräsch smak i munnen. Den innehåller en buffrad äppelsyra som stimulerar salivproduktionen samt fluor och xylitol för att förebygga karies.

1. Badda med den salivstimulerande muntorken på alla munslemhinnor, insidan kinderna och insidan av läpparna både i över- och underkäken samt i gommen och på tungan.
2. Upprepa punkt 1 och 2 utifrån individuella behov men max 20 ggr/dag.
3. Muntorken är en engångsprodukt, bruten förpackning måste användas vid ett och samma tillfälle.

### Råd när du ska hjälpa någon annan:

- Munnen är ett intimt område. Gå försiktigt fram och berätta vad du tänker göra.
- Rengör, fukta och smörj munnen regelbundet under dagen. Under de sista dyggen i palliativ vård bör återfuktning ske så ofta som var 20:e minut, enligt de nationella riktlinjerna.
- Kontakta tandvården om du behöver hjälp eller råd.

Observera att detta är en produkt med pepparmintsmak som kan upplevas stark av personer med känslig mun, vid svåra besvär eller vid munvård på någon du inte har kontakt med rekommenderas alltid Proxident gul serie utan smakämne.

### Tänk på

Använd inte muntork vid behandling av personer som biter/tuggar okontrollerat, då det finns risk för att personen biter av delar av skummet. Koncentrerade vätskor (t ex vätskor med hög alkoholhalt) kan påverka produktens hållfasthet och egenskaper negativt. Muntork är en engångsartikel som ska användas vid ett behandlingstillfälle.

# Proxident

Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

