

# Proxident Muntork smörjande

## Metodbeskrivning



**Proxident muntork med smörjande solrosolja** är mycket skonsam och lindrar mycket torra och känsliga munnar. Den har en mild smak av solrosolja och kan sväljas.

1. Om möjligt låt personen skölja med lite vatten, alternativt sug upp 1-2 ml vatten i en Proxident Muntork torr. Fukta och badda sedan alla munslemhinnor, insidan kinderna och insidan av läpparna i både över och underkäken samt i gommen och på tungan.
2. Badda med den smörjande muntorken på alla munslemhinnor, insidan kinderna och insidan av läpparna både i över- och underkäken samt i gommen och på tungan.
3. Upprepa punkt 1 och 2 utifrån individuella behov (oljan kan sväljas).
4. Muntorken är en engångsprodukt, bruten förpackning måste användas vid ett och samma tillfälle.

### Råd när du ska hjälpa någon annan

- Munnen är ett intimt område. Gå försiktigt fram och berätta vad du tänker göra.
- Rengör, fukta och smörj munnen regelbundet under dagen. Under de sista dygnet i palliativ vård bör återfuktning ske så ofta som var 20:e minut, enligt de nationella riktlinjerna.
- Kontakta tandvården om du behöver hjälp eller råd.

### Tänk på

Använd inte muntork vid behandling av personer som biter/tuggar okontrollerat, då det finns risk för att personen biter av delar av skummet. Koncentrerade vätskor (t ex vätskor med hög alkoholhalt) kan påverka produktens hållfasthet och egenskaper negativt. Muntork är en engångsartikel som ska användas vid ett behandlingstillfälle.

# Proxident

Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

